

Содержание

1. Активация функции исследования
2. Проведение анализа с помощью прибора
3. Оценка анализов и проведение исследования

Приложение Этта 2 доступно для iOS и Android:



1. Активация функции исследования


Шаг 1. Запустите приложение

После запуска вы попадёте на главный экран приложения.




Шаг 2. Откройте меню помощи

Нажмите на кнопку со значком **вопросительного знака** в верхней части экрана.

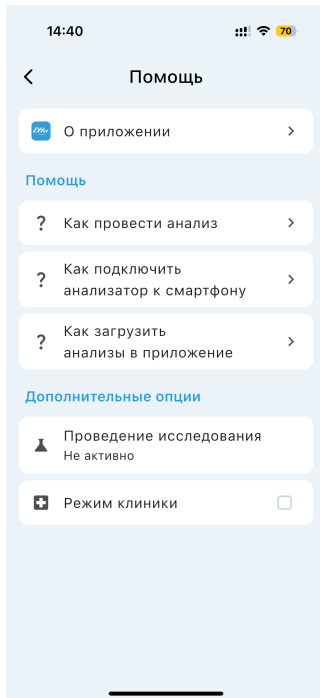

Шаг 3. Настройте режим исследования

1. Нажмите на пункт **«Проведение исследования»**
2. В появившемся диалоге настройки введите свой идентификатор на английском языке

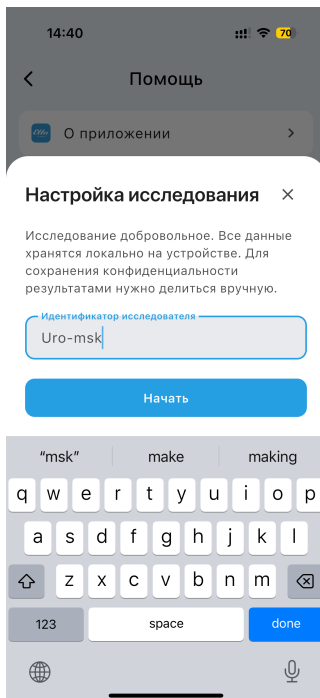

Формат идентификатора

Рекомендуем придерживаться формата: **Uro-{ваш город}**

ПримерГород

Uro-msk Москва


Uro-spb Санкт-Петербург

3. После ввода нажмите кнопку **«Начать»**

Шаг 4. Проверьте активацию

Диалог настройки закроется. В пункте **«Проведение исследования»** вы должны увидеть ваш итоговый идентификатор.

Вернитесь на главную страницу — там появится кнопка **«Исследование»**.

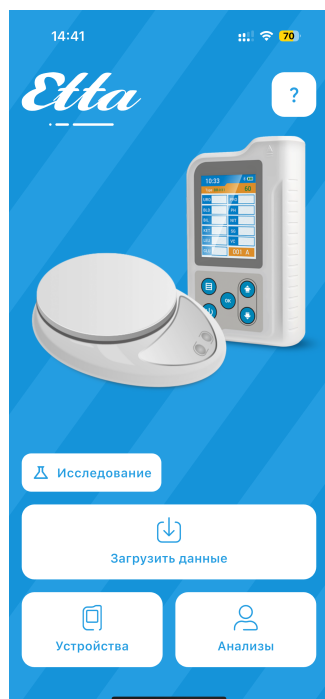

Примечание для пользователей режима Лаборатории

Если у вас активирован режим Лаборатории, попасть на страницу исследований можно через кнопку с вопросительным знаком. После активации там появится пункт **«Перейти к исследованиям»**.

2. Проведение анализа с помощью прибора

Подключение анализатора


Шаг 1. Перейдите на страницу устройств

На главной странице нажмите кнопку **«Устройства»**.



Шаг 2. Найдите анализатор


На странице устройств нажмите кнопку **«Найти анализатор»** или значок **«+»** в правом верхнем углу.

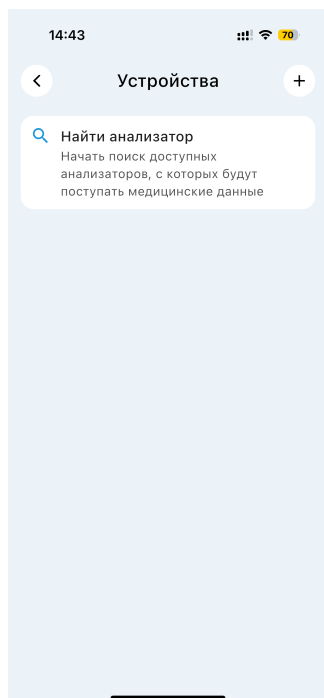

Важно: Приложение может запросить разрешения на поиск и работу с устройствами — необходимо согласиться.

Шаг 3. Дождитесь обнаружения прибора

- Держите анализатор **включённым** и **рядом с телефоном**
- Прибор должен появиться в списке автоматически
- Если прибор не найден — попробуйте запустить поиск повторно

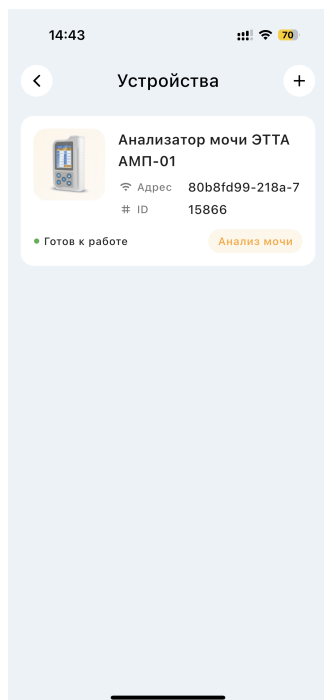

После обнаружения прибора вернитесь на главную страницу.

Загрузка данных анализа

Шаг 1. Проведите анализ на приборе


1. Выполните анализ с помощью тест-полоски
2. Поместите полоску в лоток прибора
3. Запустите анализ на приборе
4. Дождитесь появления результата на экране прибора

Шаг 2. Загрузите данные в приложение

Убедитесь, что:

- Анализатор **включён**
- На нём отображается результат анализа
- Прибор находится **рядом с телефоном**

На главной странице нажмите кнопку **«Загрузить данные»**.

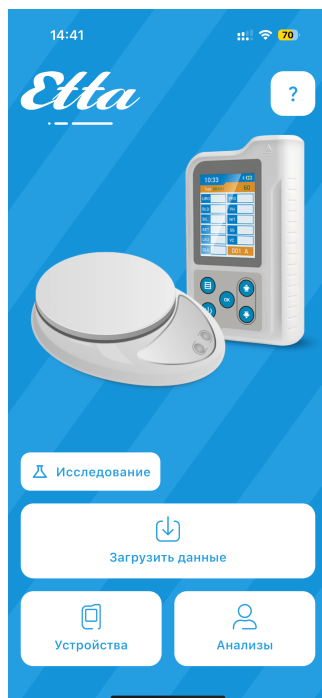

Загрузка начнётся и будет выполнена автоматически.

Примечание для старых анализаторов


При загрузке может появиться системное уведомление о сопряжении с устройством — необходимо согласиться на подключение.

При возникновении ошибки


1. Нажмите кнопку **«Повторить»**
2. Если ошибка повторяется — полностью закройте приложение и откройте снова

Шаг 3. Подтверждение загрузки

После успешной загрузки вы увидите сообщение о завершении.

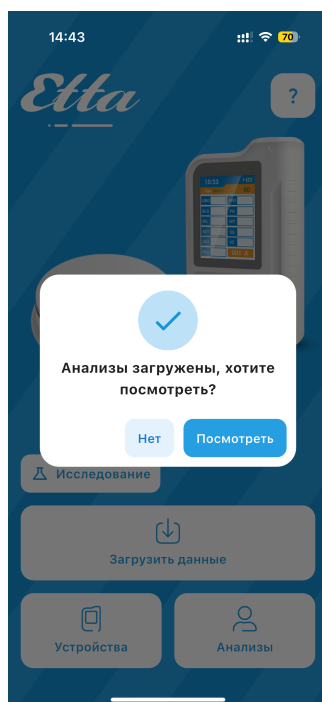

Если режим исследования активирован, появится напоминание об оценке анализа.

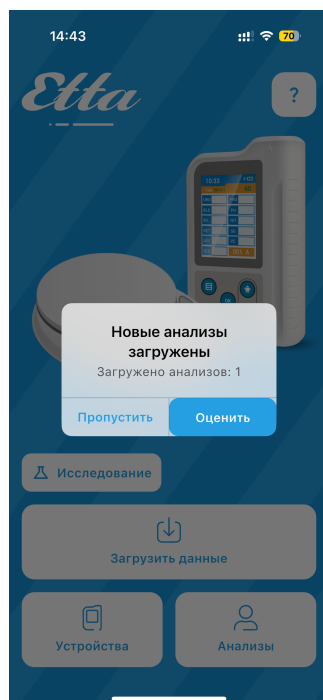


3. Оценка анализов и проведение исследования

Переход к странице исследований

Есть несколько способов попасть на страницу исследований:

- **Сразу после загрузки анализа** — вы попадаете на страницу автоматически
- **С главной страницы** — нажмите кнопку **«Исследование»**
- **Из меню помощи** — выберите пункт **«Перейти к исследованиям»**

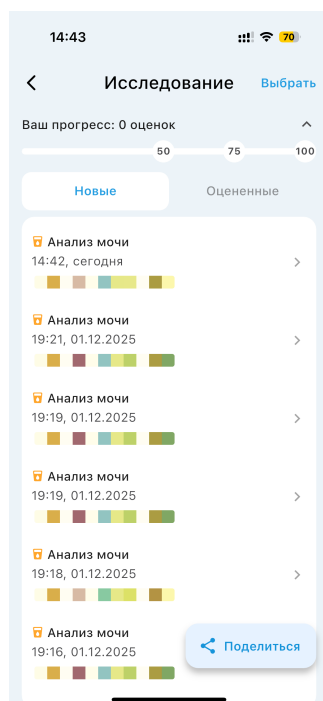

Оценка отдельного анализа

- 1. Перейдите на вкладку «**Новые**»
- 2. Выберите любой неоценённый анализ
- 3. Оцените его по критериям исследования

14:43

70

Оценка анализа

×

Дата анализа: 03.12.2025 14:42

Сценарий (Где?) *

Прием в клинике

Выезд на дом

Экстренно

Предварительный диагноз *

Цистит

Простатит/СХТБ

МКБ/Колика

Клиническое решение (Влияние) *

Назначил терапию

Отменил терапию

Пол *

Мужчина

Женщина

Возраст *

42

Комментарий

Дополнительные заметки

Максимум 200 символов0/200

Отмена

Сохранить

После оценки анализ перемещается с вкладки «**Новые**» на вкладку «**Оценённые**».

14:44

70

<

Исследование

Ваш прогресс: 1 оценка

50

75

100

Новые

Оцененные

Анализ мочи от 14:42

03.12.2025

Прием в клинике

МКБ/Колика

Отменил терапию

Боли в области живота

Поделиться

Вы можете редактировать ранее сделанные оценки, нажав на них в списке.


Групповая оценка анализов

Если вы проводите серию анализов для одного пациента и хотите оценить их вместе:

1. На вкладке «**Новые**» нажмите кнопку «**Выбрать**» (в правом верхнем углу)
2. Выберите до **10 анализов** для создания группы
3. Для всех выбранных анализов будет создана одна общая оценка

Отслеживание прогресса

Ваш прогресс по исследованию отображается в верхней части страницы исследований.

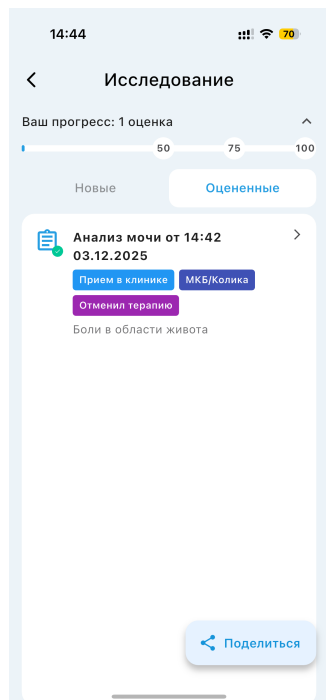


Отправка данных исследования

Шаг 1. Откройте диалог отправки

На странице исследований нажмите кнопку **«Поделиться»** (в правом нижнем углу).

Шаг 2. Выберите период отчёта

В появившемся диалоге выберите нужный срок отчёта.

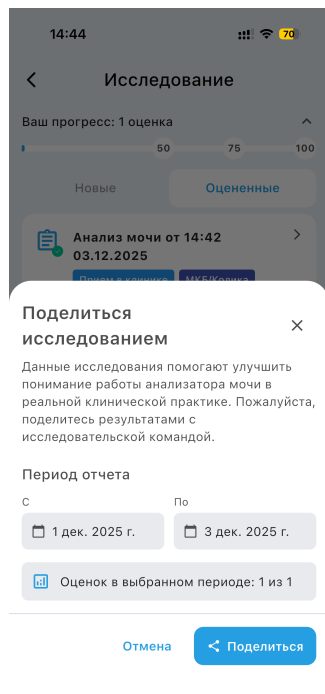

Шаг 3. Отправьте файлы

После нажатия кнопки **«Поделиться»** откроется системное меню отправки.

Вы отправляете **2 файла**:

Файл **Назначение**

PDF Для удобного просмотра

JSON Для обработки данных

Отправьте эти файлы по указанному вам адресу.

Готово! Вы успешно провели исследование и отправили данные.